

## **Waschanleitung Klinik-Textilien (Kasacks, Hosen, Mäntel, Abdecktücher)**

Baumwolle und Mischgewebe

Pflege: waschbar bis 95°C, trocknergeeignet

autoklavierbar: niedrige Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet

Sie können die Lebensdauer Ihrer Kleidung mit der richtigen Pflege erheblich verlängern.

Bunte Kleidung mit der Waschanleitung 95°C kann anfangs abfärben.

Waschen Sie dunkle Kleidungsstücke stets separat und wählen Sie ein Waschmittel ohne Bleichmittel.

Drehen Sie dunkle Kleidung stets auf links, bevor Sie sie in die Waschmaschine legen.

Das verringert den Verschleiß der sichtbaren Außenteile.

Alle Baumwollteile sollten nach der Wäsche gestreckt und zum Trocknen aufgehängt werden.

Bei der Wäsche sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass eine Überladung der Waschmaschine vermieden wird.

Darüber hinaus ist eine korrekte Waschmitteldosierung von Wichtigkeit.

Bitte beachten Sie, dass Desinfektionswaschmittel mit optischem Aufheller und Bleichmittel die Farbbrillanz der Textilien beeinträchtigen.

Farbabweichungen bei Baumwoll-/ oder Mischgeweben sind nicht ganz vermeidbar und stellen keinen Grund zur Reklamation dar.



**radofilm®**  
medizinische und  
photographische  
Produkte GmbH

[www.radofilm.de](http://www.radofilm.de)

Büro / Sitz der GF  
Deisterallee 17  
31848 Bad Münder  
Tel 0800 0317322  
Fax 0800 0317592  
[radofilm@online.de](mailto:radofilm@online.de)

Büro Mechernich  
Kölner Str. 113  
53894 Mechernich  
Tel 0800 0317322  
Fax 0800 0317592  
[radofilm@online.de](mailto:radofilm@online.de)

Büro München  
Waisenhausstrasse 57  
80637 München  
Tel 0162 9657493  
Fax 089 55292316  
[radofilm-muenchen@online.de](mailto:radofilm-muenchen@online.de)

AG Hannover - HRB 100333  
GF E.Uhlemann  
Ust.-Id.Nr.: DE 115 448 640

Gläubiger-Identnummer:  
DE46ZZZ0000560577

Sparkasse Weserbergland  
IBAN:  
DE15 2545 0110 0013 0655 86  
SWIFT-BIC:  
NOLADE21SWB